



Guía de inicio rápido

sobre la terapia del sueño de Apria para el

Philips Respironics DreamStation 2

**¡DÉJANOS
AYUDARTE!**



Inicio

Consulte su **Guía del usuario sobre la terapia del sueño de Apria** o visite **Apria.com/Sleep** para obtener más información.

1

Conecte el cable de alimentación a la máquina de PAP.

Consulte la página 4 de la Guía del usuario.



4

Vuelva a conectar el tanque de agua a la máquina de PAP.

Consulte la página 4 de la Guía del usuario.



2

Retire el tanque de agua de la máquina de PAP.

Consulte la página 4 de la Guía del usuario.



5

Conecte el tubo a la máquina de PAP.

Consulte la página 4 de la Guía del usuario.



3

Retire la tapa y llene el tanque con agua.

Consulte la página 4 de la Guía del usuario.



6

Presione el botón de terapia para comenzar.

Consulte la página 4 de la Guía del usuario.



- 7** **Ajuste su máscara. Si el médico le recetó una máscara y talla específicas, siga las instrucciones de ajuste proporcionadas por el fabricante. Si ha recibido una máscara con varias almohadillas, siga las instrucciones a continuación:**

En este momento hay una almohadilla fijada a la estructura de la máscara. Este tamaño se ajusta a la mayoría de los pacientes. Una vez que comience la terapia, si la máscara gotea o resulta incómoda, intente retirar la almohadilla existente y sustituirla por otra de diferente tamaño. Si su talla es intermedia, es mejor utilizar la almohadilla más grande. Para obtener ayuda, utilice la plantilla de ajuste (para la máscara nasal y la máscara facial completa) o consulte las instrucciones del fabricante que se incluyen con la máscara.

Consulte las páginas de la 5 a la 8 de la Guía del usuario.




Máscara nasal

Máscara nasal con almohadillas

Máscara facial completa

- 8** **Colóquese la máscara.**
Consulte las páginas de la 5 a la 8 de la Guía del usuario.

- 9** **Conecte el tubo al equipo de PAP.**
Consulte las páginas 9 y 10 de la Guía del usuario.

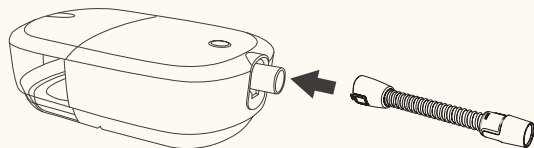

- 10** **Conecte el tubo a la máscara.**
Consulte las páginas 9 y 10 de la Guía del usuario.

- 11** **Acuéstese y respire profundamente cuatro veces.**
La máquina debería encenderse automáticamente. Si se percata de que el equipo no arranca, pulse el botón "Start Therapy/Standby" (Iniciar terapia/Pausa). Relájese y comience a respirar lentamente por la nariz.
Consulte la página 11 de la Guía del usuario.

- 12** **Compruebe si existen fugas de aire.**
Las fugas pequeñas son normales, pero si se producen fugas grandes, consulte la **Guía del usuario sobre la terapia del sueño de Apria**.
Consulte las páginas 11 y 12 de la Guía del usuario.

- 13** **La instalación está completa. ¡Ya está listo para comenzar su terapia de PAP!**
Consulte la página 13 de la Guía del usuario.

- 14** **Asegúrese de seguir las instrucciones de limpieza y mantenimiento proporcionadas, igualmente revise el calendario de sustitución de suministros recomendado.**
Consulte las páginas 16 y 17 de la Guía del usuario.



Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para configurar su dispositivo y empezar a utilizarlo, llámenos o visite Apria.com/Sleep.

877.265.2426

De lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. hora del este
Sábado, de 11:00 a.m. a 7:30 p.m. hora del este